



Packing of CVT-Unit, with Blood Samples (EU & Non EU)

1. Material

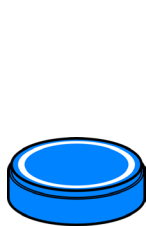

- Leeres Spendenbehältnis mit Innendeckel, enthält:
- Empty donation container with inner lid, including:

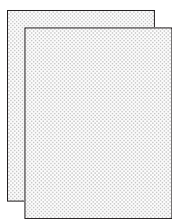

- 2 Absorber
- 2 Absorbers



- Temperatur-Logger
- Temperature logger

Watch this video tutorial first:



Außerdem benötigt Also needed



- Steriles 0,9% NaCl
- Sterile 0.9% NaCl




- 2 Blutproben
- 2 Blood samples

STERILE




- Sterile Schale
- Sterile bowl

Inhalt des CVT Transportbeutel-Sets Content of the CVT Transportation Bag Set

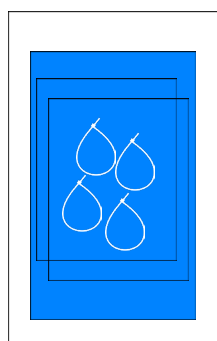

2 x


- 2 x sterile Beutel 20 x 40 cm
- 2 x sterile 20 x 40 cm / 8 x 16 in bags

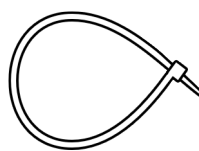

4 x


- 4 x sterile Verschlussstreifen
- 4 x sterile closure strips

2 Cardio Vascular Tissue, CVT:

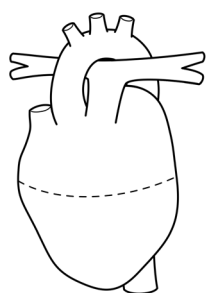

- Herz inkl. anhängender Gefäße (ggf. Apex einkürzen, um das Gewebenvolumen dem Spendenbehältnis anzupassen)
- Perikard
- Heart with adjacent vessels (if necessary, shorten the apex to adapt the tissue to the donation container volume)
- Pericardium

3 Optional Nur bei gekürztem Apex Only if apex is shortened

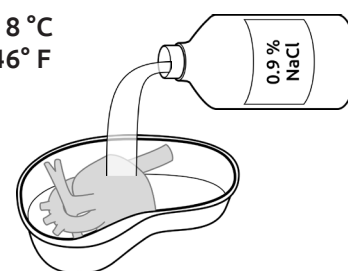


- Spülen Sie das CVT mit sterilem 0,9% NaCl.
- Rinse CVT with sterile 0.9% NaCl.

4




- Inspizieren Sie das CVT. Verwerfen Sie ungeeignetes CVT.
- Inspect the CVT. Discard any unsuitable CVT.


5

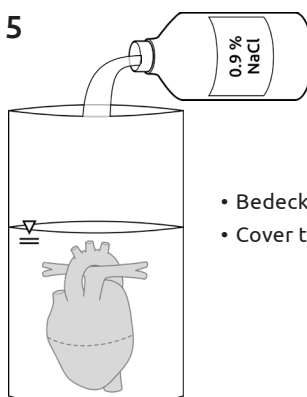

- Bedecken Sie das CVT mit sterilem 0,9% NaCl.
- Cover the CVT with sterile 0.9% NaCl.

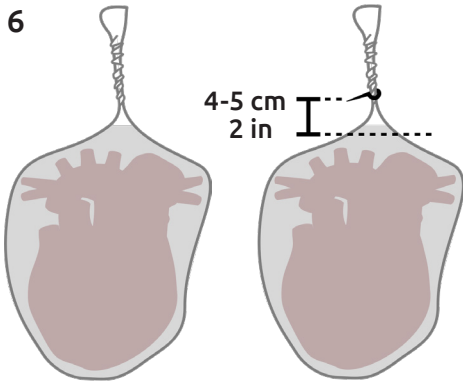


- Verschließen Sie den Beutel fest, indem Sie den oberen Teil verdrillen. Vermeiden Sie eine Luftblase. Fixieren Sie den verdrillten Part 4-5 cm über dem Gewebe.
- Close the bag tightly by twisting the upper part. Avoid an air bubble. Fix the twisted part 4-5 cm / 2 in above the tissue.

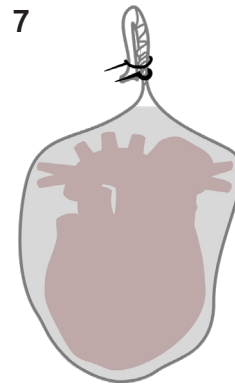


- Falten Sie das obere Ende nach unten. Fixieren Sie es mit einem zweiten Verschlussstreifen.
- Fold the upper end down and fix it with a second closure strip




- Packen Sie den ersten Beutel aufrecht in einen zweiten und wiederholen Sie den zweifachen Schließprozess (verdrillen, fixieren).
- Pack the first bag upright into a second and repeat the double closing process (twist, fix).

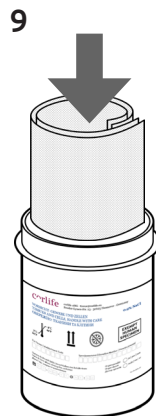


- Rollen Sie die Absorber und stecken Sie sie in das Spendenbehältnis.
- Roll the absorbers and put them into the donation container.

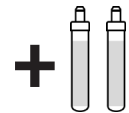

- Packen Sie den Beutel und zwei Blutproben in das Spendenbehältnis. Der Beutel steht aufrecht im Spendenbehältnis.
- Pack the bag and two blood samples into the donation container. The bag stands upright in the donation container.

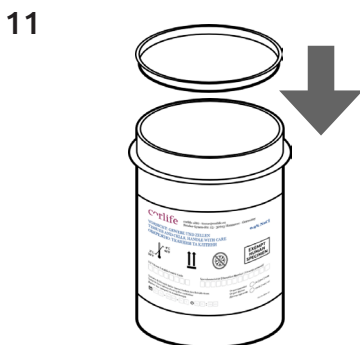

- Verschließen Sie das Spendenbehältnis mit dem Innendeckel.
- Close the donation container with the inner lid.

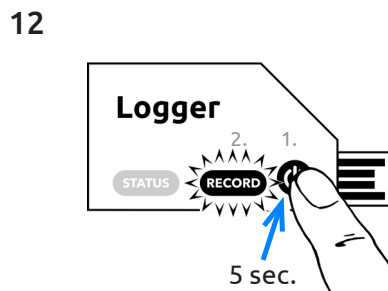

- Aktivieren Sie den Temperatur-Logger (5 Sekunden Start drücken).
- Activate the temperature logger (press Start for 5 seconds).




- Legen Sie den Temperaturlogger auf den Innendeckel.
- Place the temperature logger on the inner lid.



- Verschließen Sie das Spendenbehältnis.
- Close the donation container.



- Informationen ergänzen.
- Complete the information.

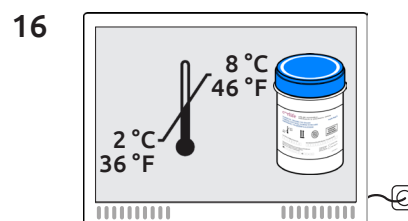

- Spendenbehältnis bei 5±3 °C / 41±5 °F lagern.
- Store the donation container at 5±3 °C / 41±5 °F.

ODER / OR:



- Direkt verpacken in CVT Transporteinheit
- Pack directly in CVT shipping unit